

SAFETY HOLDER CON AGO INTEGRATO E ORIENTATO
SAFETY HOLDER WITH INTEGRATED AND ORIENTED NEEDLE



REF15520	20G x1 1/2"	FORMATI DISPONIBILI
REF15565	20G x1"	
REF15521	21G x1 1/2"	AVAILABLE SIZES
REF15566	21G x1"	
REF15522	22G x1 1/2"	
REF15567	22G x1"	

Istruzioni per l'uso
Instructions for use




Estrarre il dispositivo dalla confezione e ruotare il copriago di sicurezza azzurro verso la base dell'holder

Take out the device from the wrapping and rotate the light blue safety needle cover towards the bottom of the holder

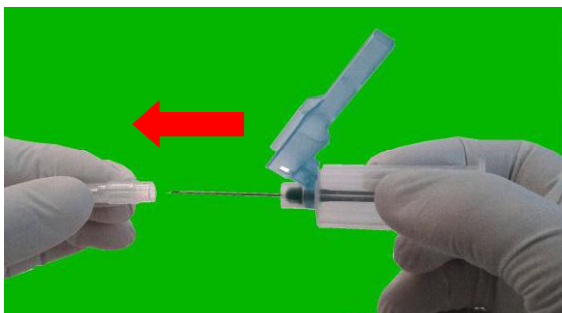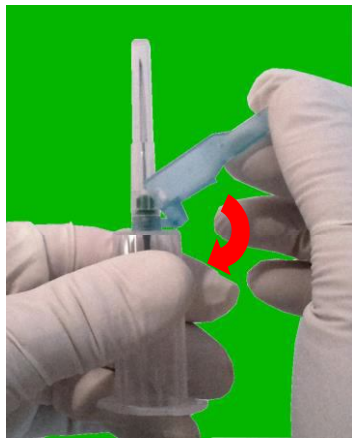

Rimuovere il copriago trasparente

Remove the transparent needle cover

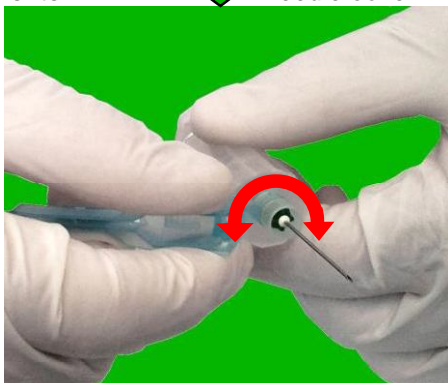


Il copriago di sicurezza è posizionato in modo da non ostacolare il prelievo ed è comunque possibile ruotarlo afferrandolo in prossimità del collegamento con l'holder

The safety needle cover is positioned so as not to interfere with blood collection and however it can be rotated by taking it near the connection with the holder




Eeguire il prelievo di sangue attenendosi alle procedure di sicurezza


Perform blood collection according to safety procedures

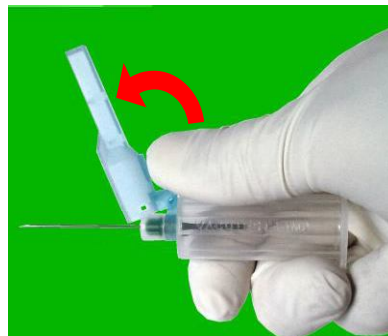

Terminato il prelievo, attivare il dispositivo di sicurezza premendolo con un pollice o contro una superficie rigida.

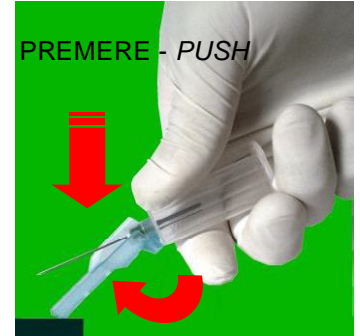

Immediately after the blood collection, activate the safety device with a thumb or by pressing against hard surface.

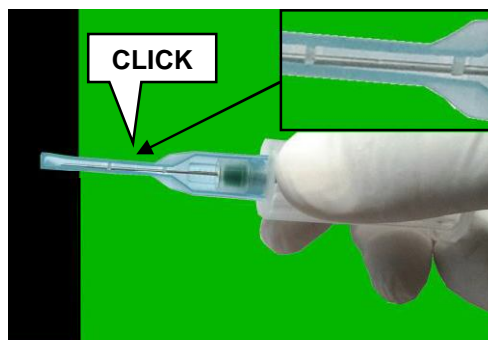

L'operazione di chiusura si conclude dopo avere udito un click e con il controllo visivo del bloccaggio dell'ago. Gettare il dispositivo in un contenitore per oggetti taglienti da avviare a termodistruzione. **NON TENTARE DI RIUTILIZZARE O MANOMETTERE IL DISPOSITIVO DOPO L'USO**

*Closing operation ends after hearing a click and with the visual check of the locking of the needle. Dispose of the device into a sharps container to be incinerated. **DO NOT TRY TO REUSE OR TO FORCE THE DEVICE AFTER USE***

